


Qualità dell'Immagine

Potenziati Errori di Posizionamento

1

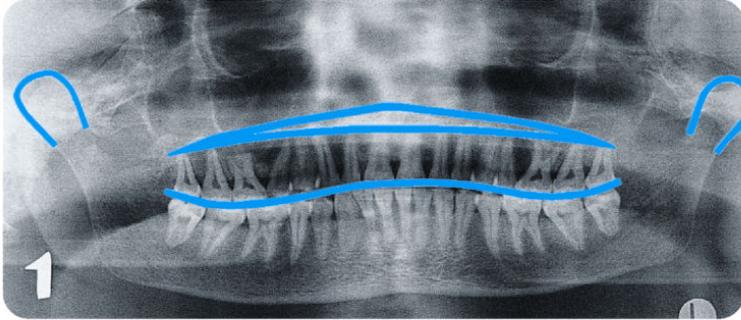


Sintomi

- Gli apici delle radici dei denti mascellari sono nascosti a causa della sovrapposizione dell'arcata palatale
- Le arcate dei denti appaiono a forma d'onda
- Le giunture Temporo-Mandibolari sono troppo inclinate verso l'esterno
- La mandibola è visualizzata più nitida della mascella

Cause

- La testa del paziente è inclinata all'indietro
- Non è stato considerato il "Piano di Francoforte Orizzontale" durante il posizionamento

2

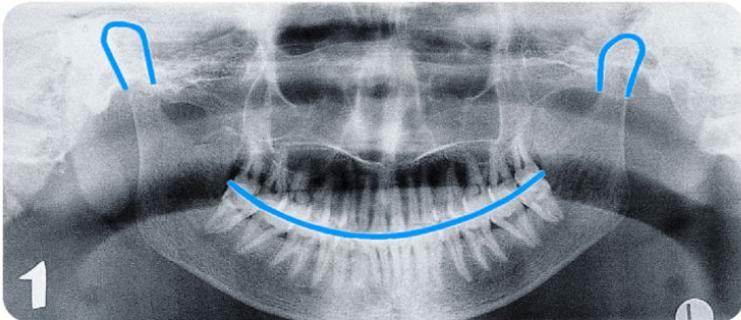


Sintomi

- Le arcate dei denti mandibolari anteriori appaiono sbiadite
- Le arcate dei denti propendono verso l'alto ai lati
- Le giunture Temporo-mandibolari propendono verso l'alto ai lati

Cause

- Testa del paziente posizionata troppo avanzata
- Non è stato considerato il "Piano di Francoforte Orizzontale" durante il posizionamento

3

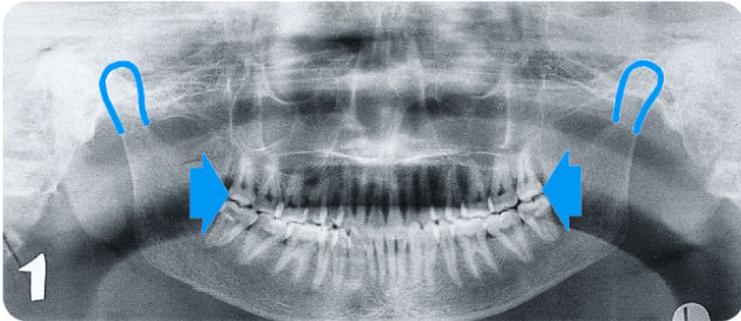


Sintomi

- I denti anteriori/canini mascellari e mandibolari appaiono sbiaditi
- Sovrapposizione dell'area molare e premolare
- I denti appaiono accalcati

Cause

- Testa del paziente posizionata troppo avanzata
- Supporto per il morso non utilizzato (utilizzato in modo errato) oppure non sono state considerate le linee di posizionamento laterali luminose (OP5/OP10)
- Supporto del mento regolato in modo troppo avanzato

4

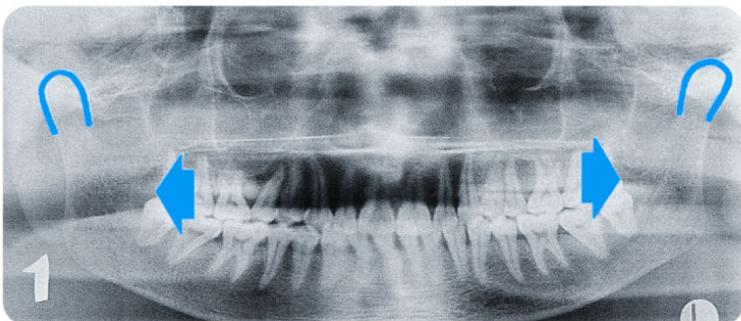

Sintomi


- I denti anteriori/canini mascellari e mandibolari appaiono sbiaditi
- Le arcate dei denti appaiono "allungate orizzontalmente"
- Le giunture Temporo-Mandibolari sono troppo proiettate verso l'esterno

Cause

- Testa del paziente posizionata troppo arretrata
- Supporto per il morso non utilizzato (utilizzato in modo errato) oppure non sono state considerate le linee di posizionamento laterali luminose (OP5/OP10)
- Supporto del mento regolato in modo troppo arretrato

Potenziali Errori di Posizionamento

5

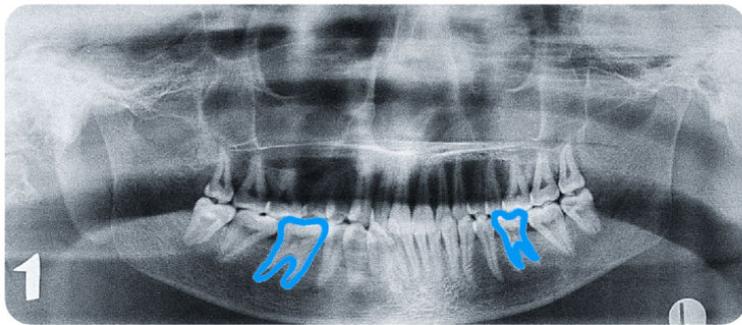


Sintomi

- Ingrandimento dei molari e premolari della mascella e della mandibola; su lati opposti della bocca denti speculari appaiono più piccoli

Cause

- La testa del paziente non è ben centrata
- I denti anteriori non sono stati posizionati utilizzando il fascio centrante del visualizzatore (OP5, OP10 & Orthophos 5, Plus CD, Plus DS, Plus DS Ceph, Plus Ceph)

6

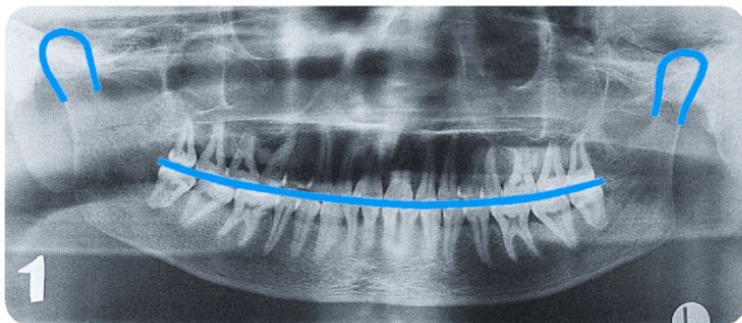


Sintomi

- Gli assi dei denti anteriori sono inclinati
- Una giuntura Temporo-Mandibolare appare più alta dell'altra
- Leggera distorsione bilaterale dei molari e premolari

Cause

- La testa del paziente è inclinata lateralmente
- La testa del paziente non è stata posizionata verticalmente utilizzando il fascio centrante del visualizzatore (OP5, OP10 & Ortho 5, Plus CD, Plus DS, Plus DS Ceph, Plus Ceph)

7

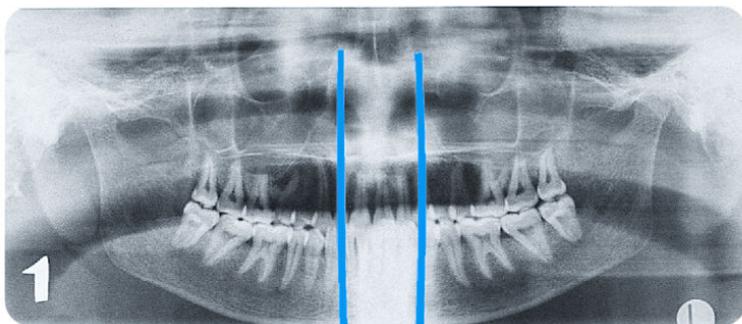


Sintomi

- L'area dei denti anteriori è troppo chiara e poco visibile

Cause

- Colonna vertebrale non ben distesa / paziente in piedi non diritto
- Il paziente dovrebbe aver fatto un piccolo passo avanti un'ultima volta per assicurarsi una posizione corretta

8

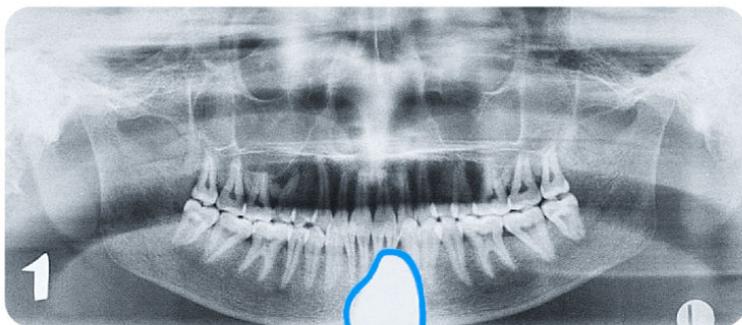


Sintomi

- "Macchia bianca" triangolare non esposta con origine sulla parte inferiore della pellicola

Cause

- Grembiule protettivo messo sul torace del paziente troppo in alto

9

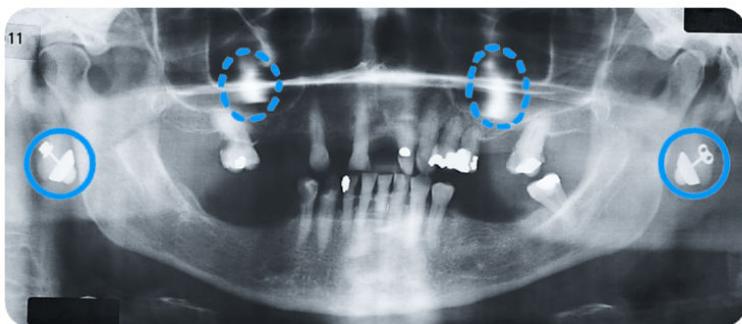

Sintomi

- "Macchie chiare" irregolari nella parte superiore o inferiore delle ganasce

Cause

- Il paziente indossa gioielli, forcine per capelli od occhiali, che sono riprodotti e/o riflessi da qualche parte nell'immagine